



Wave

Red Light Therapy

Et system med uanede behandlingsmuligheder



WWW.CAVALEROS.DK

Tillykke med dit nye WAVE produkt!

WAVE Red Light Therapy er udviklet af Cavaleros Denmark.
Vi har udtænkt en ny måde at kunne behandle med dokumenteret lysterapi.

Det er nærmest kun fantasien der sætter grænser.

Vi udvikler hele tiden på vores produktserie og laver tillægsprodukter som gør det nemt for dig at behandle dit dyr, så den er klar til at yde på topplan!

Blandt andet kommer der flere indlæg til WAVE Boots og nye produkter til hesten.
Vi vil gerne skabe produkter som kan mere end én ting!

Vi glæder os til at vise Jer de nye produkter i fremtiden!

100% dansk design og idé



Vi vil rigtig gerne være behjælpelig hvis du har spørgsmål.
Du skal du kontakte din dyrlæge hvis det drejer sig om faglige spørgsmål som har med en skade at gøre.

Vi modtager gerne "cases" og feedback fra vores kunder.

Kontakt os på
customercare@cavaleros.dk
eller på tlf +45 6073 7722

Vi glæder os til at høre fra dig!

Cavaleros Denmark
Middelfartvej 6E
DK-4200 Slagelse

Vigtig viden før brug

Batteriet er fuld opladet når du modtager dit produkt - så kan du hurtigt kan starte behandlingen

Vi anbefaler at bruge WAVE RLT 3 gange dagligt

Overbrug af WAVE kan ikke skade din hest

Vær altid opmærksom på dit dyr når du bruger WAVE og efterlad det aldrig alene

Dyr er sensitive væsner.

Brug aldrig WAVE RLT på en tumor med mindre at du gør det i samråd med en dyrlæge

Brug ikke produktet på diegivende eller gravide - dyr eller mennesker.

Vær opmærksom på at behandle dit dyr hvis det får medicin for lysfølsomhed så som

Tetracyclin

Læg aldrig dit WAVE på en beskidt og våd hest/hund

Lad aldrig børn betjene WAVE RLT

Brug aldrig produktet hvis hesten står i vand

Beskyt ledning og adapter og brug kun originale ledninger osv til brugen

Brug af batteriet på et andet produkt kan skade batteriet. Det er lavet specielt til

WAVE så det skal kun bruges til WAVE.

Lad ikke dyret bide eller lege med ledningen eller produktet

Hvis produktet er beskadiget skal du ikke bruge det!

Lad ikke din hest træde på produktet!

Påfør aldrig salver, cremer eller andet FØR behandlingen med WAVE

Cavaleros er ikke erstatningspligtig hvis din dig/hest/hund eller du kommer til skade ved brug af WAVE produkterne, hvis grunden er grov uagtsomhed.

Søg altid råd hos din dyrlæge hvis du er i tvivl

Reparerer aldrig på WAVE RLT, DC stik, batteri eller oplader

Vi yder 2 års reklamationsret mod fabrikationsfejl - ikke slidtage eller hvor produktet er ødelagt på grund af forkert brug.

Reklamationsretten bortfalder hvis ikke du behandler WAVE RLT som foreskrevet



Vigtig viden før brug

Se aldrig direkte ind i lyset
Skærm lyset for øjet på dit dyr
Efterlad aldrig produktet på din hest eller dyr uden opsyn
Sæt dit dyr er et behageligt sted, gerne et sted med ro.
Brug kun produktet på hest som er opbundet!
Lad aldrig din hest/hund gå rundt med produktet på
Brug kun originale ladere eller batterier til produktet
Hiv aldrig stikket ud af Wave-pad UDEN at holde fast i begge dele.
Efterlad aldrig din WAVE RLT samt batterier i et fugtigt miljø
WAVE RLT tåler ikke at komme i vaskemaskinen
WAVE RLT rengøres forsigtigt med hårdt opvredet klud - og aldrig nær DC stikket
WAVE RLT er fyldt med fin elektronik så behandl det som du vil behandle en tv-skærm.
WAVE RLT kan bøjes i alle retninger men ikke samtidig! Så går den i stykker i den plade der ligger
indeni. Dette dækkes ikke som en reklamation.
Man skal være forsigtig når man bøjer WAVE RLT - den må ikke "knække" i den inderste plade.
Lad aldrig produktet op samtidig med at du bruger det på hesten!
Læg altid en tyndt klæde mod hestens hud hvis du behandler et åbent sår
Hav aldrig din WAVE RLT tændt i mere end 60 minutter ad gangen.

Hav ALDRIG din WAVE RLT og batteri koblet til hinanden mens du lader!
Læg ALDRIG din oplader og batteri i solen mens den lader. Der er fare for overophedning og eksplosion!
Hvis du oplever mislyk fra produktet så stop med at bruge det med det samme!
Det kan have en skade!
Produktet kan bruges i MAX +30 graders varme og må ALDRIG efterlades i solen!
Oplad kun batteriet i MAX 1-3 timer - det er et hurtigopladende batteri.
Lad ALTID dit batteri langt væk fra letantændelige genstande!
Lad dit batteri på et stengulv eller flisegulv.
Opbevar ALDRIG dit batteri i meget varme eller kolde omgivelser eller i direkte sollys - opbevares i
stue temperatur 20-25 grader
Brug ALDRIG et produkt der er skadet på nogen måder!

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



Hvor adskiller WAVE RLT sig fra andre lignende produkter?

Vi har udviklet et produkt som er helt unikt og som aldrig er set før!

Ingen har før lavet et system som vores. Mange har lavet lysterapi, men ingen har den brugervenlighed som vores!

Vi har forfinet brugen af lysterapi på en måde som gør det anvendeligt overalt på hestens eller hundens krop. Holdbarhed, brugervenlighed samt effektivitet og et lækkert design...
...det var udgangspunktet for at udvikle WAVE.

Vi vidste at hvis det blev for kompliceret og besværligt at bruge - så ender det tit med at man ikke får det brugt! Eller hvis batteriet hele tiden skulle lades op, så blev det heller ikke brugt! Dét har vi gjort noget ved!

Alle produkter kan sættes sammen med velcro og alle batterier passer sammen. Så man kan altid udvide og forstørre sit købte produkt.

Holdbarheden skal også være i top!

Vi har målrettet gået efter den bedste kvalitet. Ikke kun på designet men også på alle de andre dele!

Batteriet er den nyeste teknologi og lades fuldt op på bare 1 time!

Det holder strøm i rigtig lang tid - faktisk flere uger!

Og så er vores lysterapi op til 25 gange stærkere end andre lysterapi-produkter på markedet.



LED'en er også den absolut nyeste teknologi. Vi har et tæt samarbejde med vores producent - og de er specialister inden for netop den type af LED.

LED er nemlig ikke bare LED. Effekten kommer meget an på hvor meget modstand hver LED giver og dette må helst ikke sætte sig som termisk varme (FIR) Men skal forblive i den rette modstand.

Mange produkter bruger gammeldags teknologi som kræver enorm mange WATT for at give rette mængde effekt. Med den nyeste teknologi kræves der ikke nær så mange WATT for at give den korrekte effekt. Men det er stadig vigtigt at have en mW/cm² som er effektiv.

Vores ligger på 77,8-90 mW/cm² på vores WAVE RLT PADS og over 217mW/cm² på WAVE RLT PEN - hvor mange andre kendte brands ligger på mellem 3-40mW/cm²!

Hver eneste LED bliver testet i store testhaller, hvor de ligger tændt i flere dage for at tjekke kvaliteten og der bliver målt bølgelængder inden de bliver afsendt fra fabrikken. Intet forlader testhallerne før de har gennemgået de mange test.

Vores producent leverer lasere og medicinsk udstyr til hele verden og har alle de godkendelser det kræves at lave medicinsk udstyr.

Blandt andet leverer de til USA hvor lyset er godkendt til medicinsk brug på mennesker til smertelindring og mod inflammation.

Alt er CE godkendt og sendt til test for at sikre at de opfylder alle sikkerhedskrav samt de rigtige specifikationer.

De bliver tjekket for de specifikke bølgelængder samt effekt - så vi er helt sikre på at vores produkt lever op til at kunne levere det de skal.

Vi bruger dobbelt LED så hver eneste LED har 2 effekter. Den har både 660 nm rødt lys og 850 nm NIR (Nærinfrarød). Præcis som en laser som afgiver flere lysbølger samtidig.

De fleste andre produkter kører med ældre teknologier som kun har én effekt i hver LED.

Vi kan derfor også garantere at vores produkter overholder alle krav og at du får et effektivt produkt når du står med dit WAVE produkt i hånden.

Vi er meget stolte over at have udviklet et produkt som lever op til vores meget strenge krav!

Cavaleros står for høj kvalitet - hvilket du også vil se i dette produkt!





Vores system er baseret på en alsidighed og mulighed for at bruge din WAVE RLT stort set alle steder på din hest.

Om du vil ramme brystbenet eller hasen så kan du gøre det nemt ved at skifte WAVE Belts (stropper)

Vi har endda gjort det nemt for dig ved at udvikle en smart grime WAVE Halter som giver dig mulighed for at behandle din hest på de sarte nervebaner i hestens kranie!

Vores pads er solide og holdbare og kan bøjes i alle retninger, dog må de ikke bøjes i to retninger samtidigt! Det kan den ikke tåle!

De er rengøringsvenlige og batteriet kan flyttes rundt med velcro. Så du oplever ikke at batteriet falder af eller sidder et dumt sted under behandlingen.

Vores batterier er den bedste teknologi på markedet!

Lithium-ion : 11.1V/2200mAh
DC 12.6V
Charging current: 0.2-1C

Det betyder at du ikke skal bruge tid på at lade tit.
Faktisk holder det strøm til flere uger selvom du bruger den hver dag.
Den tager kun 1-3 timer at lade FULDT op!



Hvad kan du behandle?

- vævsskader
- betændelse
- blå mærker
- forbrændinger
- spat - heling/lindring (heste)
- mindskning af arvæv
- ledbåndsproblemer
- seneskader
- ømme/stramme muskler
- forstuvninger
- hævelser
- hovedpine
- migræne
- spytkirtelproblemer
- sår-heling
- gigt
- svamp hos heste
- Saciod hos heste
- effektiv på akupunktur-punkter /triggerpoints
- muk (hest)
- forfangenhed (hest)
- meniskskader
- overbelastningsskader både forebyggende og efter træning

Du kan finde en masse links på vores side hvor du kan læse om de mange forskellige studier der er lavet med lysterapi.

Behandling af hunde

Behandling af hunde er meget effektivt.

Dog er hundene mere følsomme så behandlingstiderne kan nedsættes. Dog er det meget forskelligt fra hund til hund.

Vi oplever at nogen hunde ligefrem søger hen til WAVE RLT og ligger sig på den. Mens andre er lidt skeptiske i starten!

Tving aldrig hunden til at ligge under WAVE RLT
Hold altid øje med den

Du kan behandle de samme typer skader på hunde som du kan med heste.

Vi anbefaler fra 1 minut til 10 minutters behandling af hunde.

Især hårdtarbejdende hunde har stor gavn af lysterapi til at forebygge overbelastningsskader!

Du kan øge hundens ydeevne og velvære ved at bruge WAVE RLT ofte på din hund.



Kundefoto


Hvorfor lysterapi?

Behandling med rødt lys med en helt specifik bølgelængde styrker celledeling og er kendt som ATP-booster. Lysbehandling har en gavnlig effekt på mange områder.


LED terapi-lysenes specifikke bølgelængder øger cirkulationen og øger dannelsen af nye kapillærer. De nye kapillærer fremskynder helingsprocessen ved at transportere mere ilt samt flere næringsstoffer til områder. Samtidig transporteres flere affaldsstoffer væk.

Kollagen er det mest almindelige protein der findes i kroppen og er et vigtigt protein der erstatter og reparerer beskadiget væv. Flere undersøgelser viser at LED-Terapi-lys stimulerer produktionen af kollagen og derved mindskes arvæv.

Lysterapi er medicinsk godkendt til mennesker i USA og bruges som smertelindring og mod inflammation!

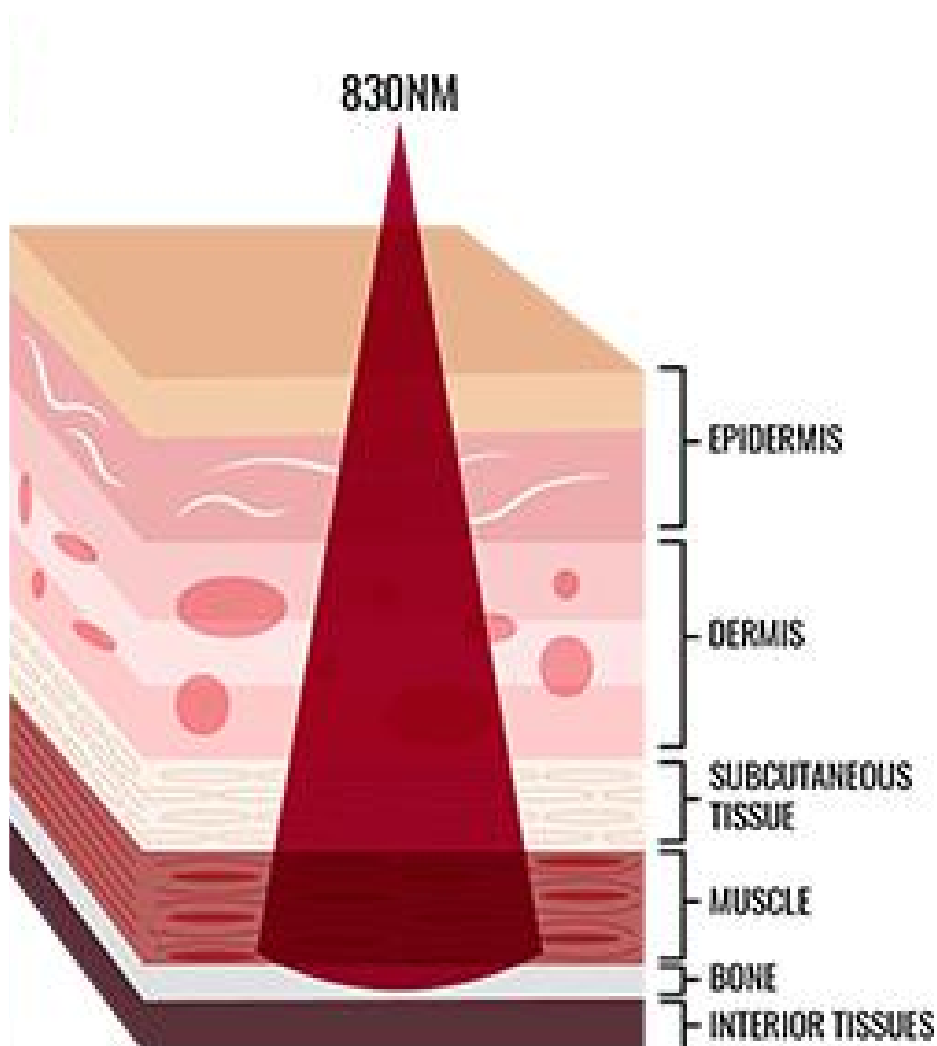

Hvad betyder de forskellige bølgelængder?

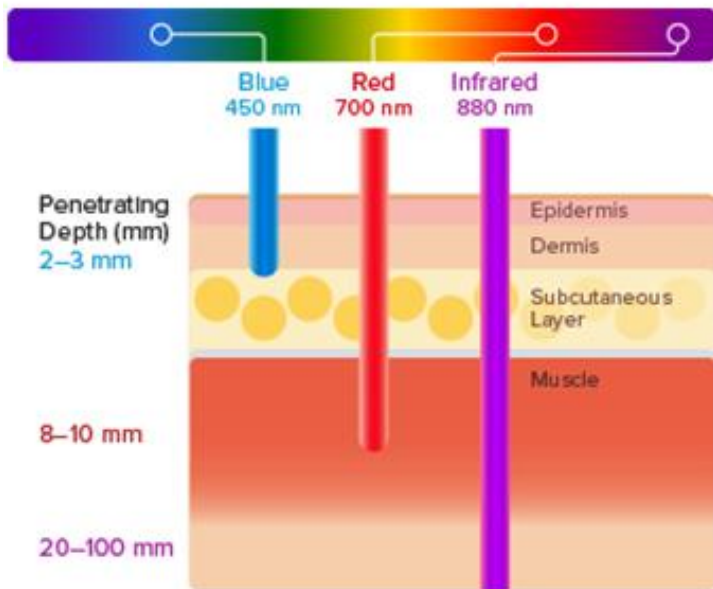

De forskellige bølgelængder er med til at bestemme hvor dybt de behandler.

De mest brugte bølgelængder er de røde og infrarøde da de når dybest ind i vævet.

Derfor bruger man også tit rødt lys til behandling af sår så det heler indefra og ikke kun på ydresiden. Det blå lys bruges typisk til acne-behandling da man kun arbejder i det øverste tynde lag hud.

Der er stor forskel på brugen af FIR & NIR.


FIR (Far infra red light) det føles som varme og øger blodcirkulationen. Det kan også være din egen kropsvarme der bliver sendt ind i kroppen. Det har ingen behandlende effekt på cellerne. Men giver velvære.

NIR (nær infra rødt lys) behandler på celleniveau og regenererer cellerne og tilfører energi som er cellernes drivkraft og giver en effektiv og dokumenteret behandling.


Vi bruger kun de bølgelængder der har dokumenteret effekt i det spektrum af lys hvor der er lavet studier, nemlig 660 nm rødt lys samt 850 nm Nær Infrarødt lys

Wave Length in Nanometers (nm)

The 5 Bioactive Forms of Light

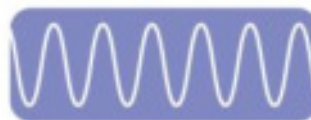

UV Light interacts with our skin to make vitamin D, a regulator of over 2000 genes in our body, affects the immune system and is linked with all kinds of disease and mortality outcomes.

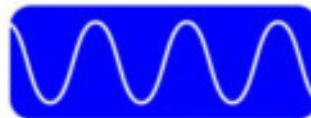

Blue Light enters your eyes, feeds back through nerves into a part of the brain called the suprachiasmatic nucleus, where your circadian clock lies. The circadian clock in our brain regulates different hormones and neurotransmitters that affect metabolism, appetite, energy levels, mood, wake, and sleep cycles.



Red Light electromagnetic waves at the end of the visible spectrum.



Near-Infrared Light is not visible. Red and near-infrared light can penetrate inches into the body where they directly interact and modulate the function of cells.




Far Infrared Light We feel it as heat in our bodies. It affects things like circulation and blood flow.

WAVE RLT stimulerer frigivelsen af adenosintrifosfat (ATP). ATP er den største energi-bærer til alle celler og leverer den kemiske energi, der driver den kemiske reaktion i cellen. Stigninger i ATP giver cellerne mulighed for at bruge næringsstofferne hurtigere og slippe af med affaldsstoffer.


WAVE RLT øger også lymfesystemets aktivitet.

Derfor kan man også se effektive behandlinger med WAVE Red light Therapy. Man ser op til 200% hurtigere heling med lysterapi.

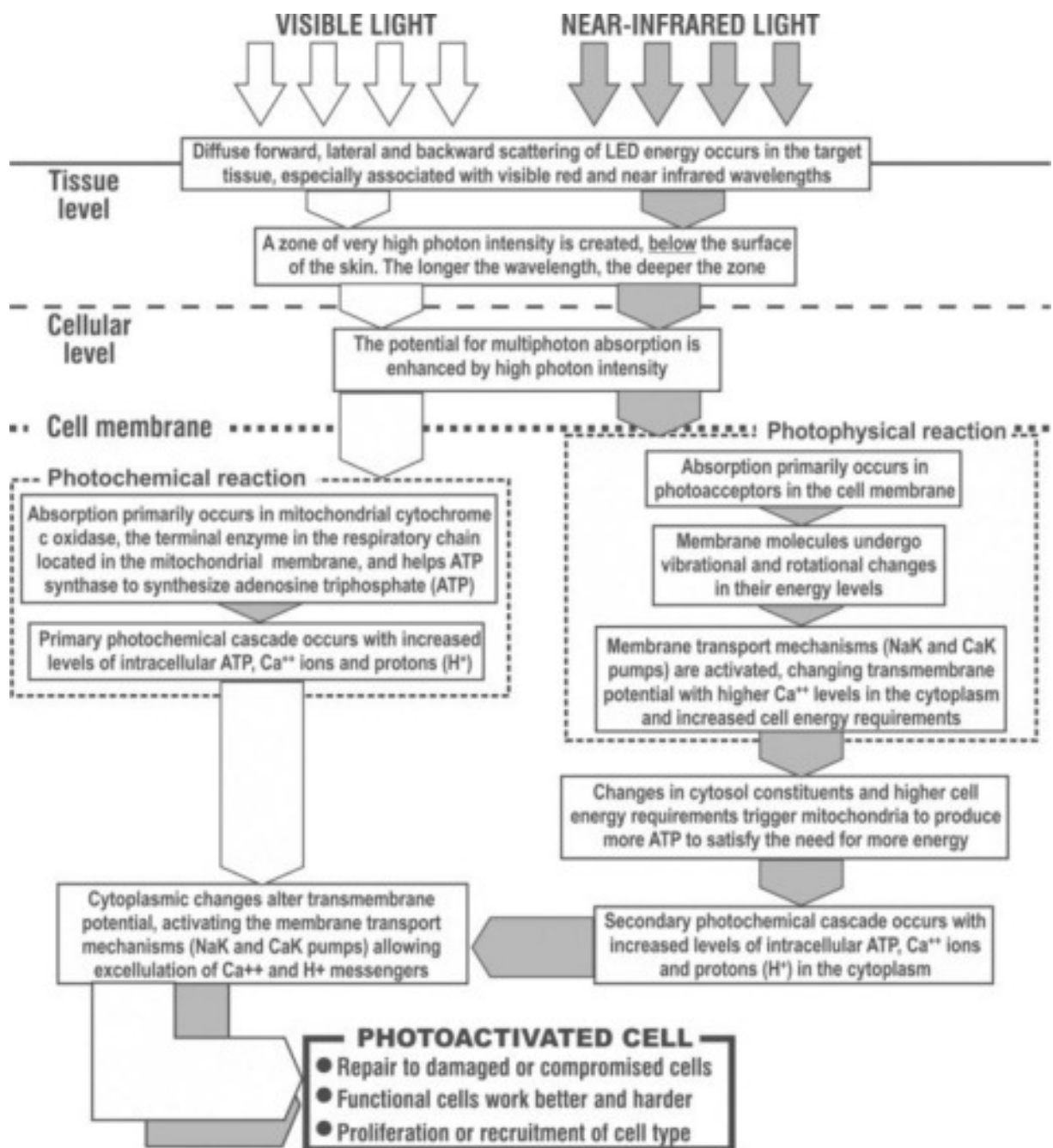

Før & Efter

Sacoid på hest
før/efter 1 uges behandling 1
gang dagligt

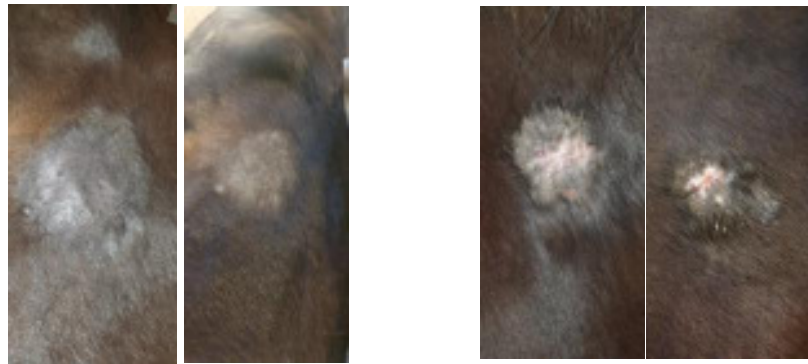

Svamp hos hest efter 2 ugers
behandling



Hegnsskade med pæl
1,5 md mellem billeder



Behandlingsskema til WAVE RLT Pads

| Let skade/let smerte/ forebyggende behandling | Moderat skade/moderat smerte/kronisk behandling | Svær skade/svær smerte/akut behandling |
|--|---|--|
| Vi anbefaler 5-8 minutter i hver område 1-2 gange dagligt. | Vi anbefaler min. 10 minutter i hver område 2 gange dagligt. | vi anbefaler min. 10 minutter i hvert område 3-4 gange dagligt. |
| Der pålægges 50% ekstra tid ved store muskelgrupper | Der pålægges 50% ekstra tid på de store muskelgrupper | Der pålægges 50% ekstra tid på de store muskelgrupper |
| Behandlingen kan fortsætte så lang tid det ønskes | Behandlingen sættes ned til 5-8 minutter 1-2 gange dagligt efter 3-4 ugers behandling | Behandlingen sættes ned til 2 gange dagligt efter 3-4 ugers behandling, og igen til 5-8 minutter 1-2 gange dagligt efter 3-4 ugers behandling. |

Denne tabel gælder som en guide til WAVE RLT pads - der vil altid være undvigelser. Kig altid på dit dyr - hvis dyret er roligt og nyder behandlingen så kan du sagtens fortsætte.

Du skal stoppe hvis dit dyr ændrer adfærd eller bliver urolig.

Hunde skal have mindre behandlingstider end heste.

Til dem anbefaler vi halvere behandlingen den første uge

Det er altid en god ting at spørge din behandler eller dyrlæge til råds!

Vi er altid klar til at hjælpe dig hvis du måtte have spørgsmål.

Sådan kommer du igang!

Din WAVE RLT er klar til brug når du modtager den.
Vi har nemlig sørget for at batteriet er fuldt opladet og klar til brug.

Der medfølger nogle stropper med velcro som du bruger til at sætte WAVE RLT fast på din hest eller hund.

Det er vigtigt at du starter med at sætte velcro og WAVE RLT på først uden batteriet. Så du kan se reaktionen på dit dyr.

Derefter sætter du batteriet fast på WAVE RLT tæt på DC stikket.

Derefter kobler du de 2 ledninger sammen og WAVE RLT tænder og behandlingen er i gang.

Du slukker ved at frakoble ledningerne.

Det er vigtigt at du sætter WAVE RLT så tæt på huden så muligt.

De stærkeste lysbølger 850 nm trænger mellem 20-100 mm ind i vævet afhængig af vævstypen.

Jo længere væk lyset er fra huden - jo svagere behandling.

Vi anbefaler at du bruger din WAVE RLT ca. 1-3 gange dagligt, se evt skemaet på næste side.

Vi har gode erfaringer med at bruge den FØR og EFTER træning, samt at øge antallet af behandlinger ved en skade.

Spørg altid din dyrlæge til råds. Lysterapi kan ikke erstatte dyrlægens besøg.



Alle vores produkter er flot pakket ind så du nemt kan transportere det med i stalden uden at det tager skade.

Sådan påfører du WAVE RLT i WAVE Boots

Du åbner din WAVE Boot.

Du kan fjerne FIR-indlægget (varmeindlægget) som medfølger i WAVE boots, og sætte din WAVE RLT direkte i i Therapy Boots, eller lade FIR-indlægget være i og sætte lyset ind ved at fjerne velcro-stropperne.

Fjerne du indlægget er der en stribe med velcro hvor du ligger WAVE RLT Small/Medium henover på den lange led, med DC stikket øverst.

Derefter ligger du forsigtigt WAVE Boot på din hests ben.

Du kan bruge WAVE RLT Small på højkant (som billede) eller vandret.

Medium kan kun bruges på højkant!

Pas på at du ikke får sat den så langt nede at hesten kan træde i den.

THERAPY BOOTS kan kun bruges med WAVE RLT Small & WAVE RLT medium.

Hvis du bruger MEDIUM i BOOTS så sørg for at WAVE RLT ikke bliver bukket bagover hvis hestens bøjer sit ben!

Vi anbefaler ikke MEDIUM i str Pony/Cob BOOTS

Forsøg aldrig at vikle LARGE rundt om benet!



Du hæfter den fast med velcroen så den sidder fast.

Den må ikke komme for langt ned så hesten kan træde i den.

Gå først videre når din hest står stille og roligt.

Herefter fjerner du det øverste brede velcro med WAVE-logoet som sidder på WAVE Boot.

Herefter sætter du WAVE batteriet fast på den øverste del af WAVE Boot.

Du sikrer dig at den sidder godt fast.

Derefter tilslutter du ledningen til batteriet.

Behandlingen er påbegyndt.

Afventer 3-5 min.

Efter behandlingen fjerner du forsigtigt batteriet ved at holde med begge hænder og trække det fra hinanden.

Undgå at rive i ledningen.

Tag aldrig produktet af hesten med batteriet tændt.

Du kan genbruge samme WAVE Boot til det andet ben eller bruge den gamache til det modsatte ben. Du gentager behandlingen.



Sådan påfører du WAVE RLT i WAVE Halter (grimen)

På grund af de mange nerver og spændinger i hestens hoved, vil du opleve stor effekt på behandling af WAVE RLT i hovedet på din hest.

Især godt for tungeben, smerter fra tænder, smerter fra trykninger osv

Du giver din hest grimen på.

Din hest skal stå opbundet. Og den skal stå roligt før du fortsætter. Den skal helst ikke spise samtidig.

Du løsner karabinen i højre og venstre side så det nederste stykke hænger løst.

Du fjerner velcroen der sidder indvendigt 3 steder i grimen.

1 på hver side af kæben og 1 på det midterste stykke.

Derefter tager du din WAVE RLT Small.

Du sætter WAVE RLT fast i velcroen på begge sider af grimen. Først på kæben.

Er din hest meget bred om kæben kan du vedhæfte den på den ene side og det underste stykke vil holde Wave RLT fast.

Du lukker begge karabinhager.

Nu er du klar til at sætte batteriet fast.

Vælg et sted hvor der er god plads tæt på DC stikket.



Gå først videre når din hest står stille og roligt.

Du sætter du stikket i WAVE RLT og behandlingen er igang.

Undgå at rulle ledningerne rundt om grimen!

I en panik-situation skal du først fjerne batteriet og der skal hurtigt kunne komme af uden at ødelægge produktet.

Tilslut ledningerne.

Behandlingen er påbegyndt.

Afventer 3-5 min.


Efter endt behandling frakobler du ledningerne. Du holder forsigtigt fast i ledningen og batteriet og afkobler.

Undgå at rive i ledningen.

Fjern aldrig WAVE RLT med lyset tændt! Det kan skade din hests øjne at kigge ind i lyset.

Når du har fjernet WAVE RLT. Sættes velcro stykkerne igen på grimen.

Du kan stort set behandle hele hestens hoved med WAVE RLT Small & Medium

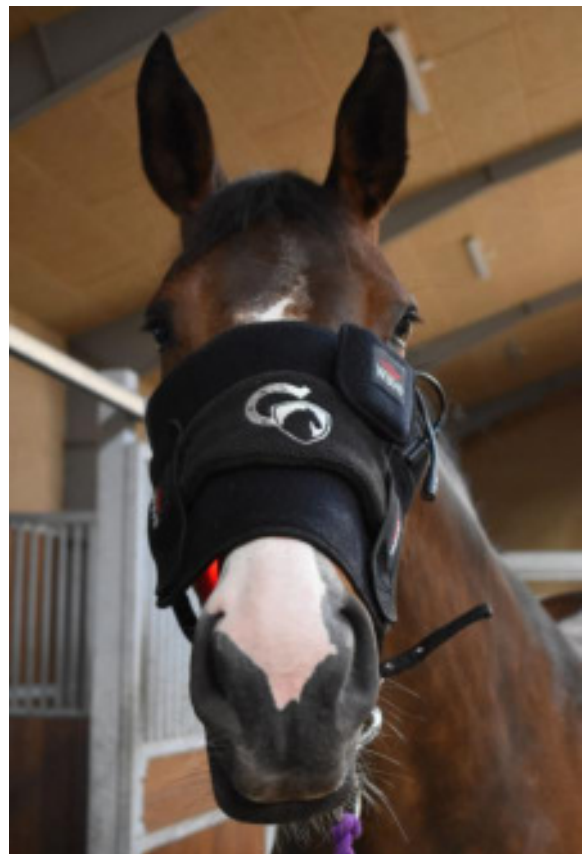

Sådan påfører du WAVE RLT i nakke-området

Du giver din hest en grime på. Du kan med fordel bruge WAVE Halter grimen.

Din hest skal stå opbundet. Og den skal stå roligt før du fortsætter. Den skal helst ikke spise samtidig.

Derefter tager du din WAVE RLT Small.

Du løfter op i nakkestykket på grimen og placerer forsigtigt WAVE RLT Small under grimen på den lange led så den dækker et stort område.

Du bruger WAVE Belt S til at vedhæfte WAVE RLT Small til grimen så den sidder godt fast og ikke kan rykke sig.

Sæt en på hver side.

Vær forsigtig hvis du bruger størrelsen Medium. Vores erfaring er at Small ligger bedst i nakken.

Vær altid forsigtig når du påfører WAVE RLT i nakken - mas aldrig pad'en ind under. Men sørg for at der er god plads.



Nu er du klar til at sætte batteriet fast.
Vælg et sted hvor der er god plads tæt på DC stikket.

Gå først videre når din hest står stille og roligt.

Du sætter stikket i WAVE RLT og behandlingen er i gang.
Har du et forlænger kabel sættes det først i batteriet og dernæst i WAVE RLT.
Undgå at rulle ledningerne rundt om grimen!
I en panik situation skal du først fjerne batteriet og der skal hurtigt kunne komme af uden at ødelægge produktet.

Tilslut ledningerne.
Behandlingen er påbegyndt.

Efter endt behandling frakobler du ledningerne. Du holder forsigtigt fast i ledningen og batteriet og afkobler.

Undgå at rive i ledningen.
Fjern aldrig WAVE Pad med lyset tændt! Det kan skade din hests øjne at kigge ind i lyset.



Sådan behandler du hasen

Du kan behandle med din WAVE RLT stort set alle steder på hestens krop.

Også på de bevægelige led som netop har brug for en hurtig og effektiv heling. Især hasen kan være svært at få noget til at sidde fast.

Men ikke med WAVE.

Du skal bruge WAVE RLT Small + 3 Small stropper eller 3 Medium stropper afhængig af størrelse på hesten.

Denne hest er 175 i stg og bruger 2 Medium og 1 Small (nederst)

Man kunne også sagtens bruge Small til denne størrelse hest.



Sørg altid for at hesten står stille og ikke forsøger at sparke WAVE RLT af.

Sæt ikke batteriet fast før hesten er rolig.

Hesten skal ALTID stå opbundet og under opsyn. Gå aldrig fra din hest mens den får behandling.

Sæt altid batteriet på ydersiden.

Sæt forsigtigt DC stikket i WAVE RLT. Behandlingen er i gang.



Has

Med samme stropper kan du behandle forknæet også



Sådan behandler du bagknæ

Der er mange heste der lider af knælåsninger - ses hyppigt på unge heste!

Vi har lavet et system så du effektivt kan sætte din WAVE på bagknæet af din hest.

Især effektivt efter fjernelse af mus - til hurtigt heling.

Du skal bruge WAVE RLT Small eller Medium. På billedet er brugt Small.

2x XL Stropper + 1 XXL (lægges over lænden på hesten)

Du kan måle din hest hvis du er i tvivl om længden.





Der kan bruges 2 WAVE RLT samtidig for hurtig behandling. Evt en medium

Vær altid forsigtig. Sørg for at hesten ikke træder på WAVE RLT.
Der er dyr elektronik inden i - som ikke tåler det.

Dog har vi oplevet af hesten har trådt på WAVE RLT uden at der skete noget.
Men det vil ikke være dækket af garantien hvis den gik i stykker af vægten fra en hov.

Sådan behandler du brystbenet



Det er uhyre effektivt at behandle hestens brystben.

Vi kender det fra massører og andre behandlere at hestene tit har problemer der. Spændinger og ømme muskler.

Vi har udviklet et system hvor du på ingen tid kan behandle din hest effektivt på brystbenet. Mens du f.eks laver noget andet!

Nu behøver du ikke at skulle holde en lysterapi-måtte for at give din hest en behandling. Du har hænderne fri mens din hest får lysterapi.

Du kan bruge både Small & Medium WAVE RLT - på billedet er vist med Small RLT. Hesten er 175 i stg.

Du skal bruge 2 X XL til skulder. 1 Large til mellem forben.

1 x 3XL om maven eller 2 x XXL afhængig af hestens gjordmål.

Sådan behandler du lænden



Du kan bruge Small, Medium, Large, X-Large & XX-Large WAVE RLT til lænden og overlinen.

Det er klart at jo større WAVE RLT jo mere effektiv og hurtig er behandlingen.


Alle WAVE RLT kan sættes sammen med velcro. Så man kan nemt lave en størrelse som passer til det område man vil behandle.

Store muskelgrupper kan du godt give en længere behandling. 10-20 min.

Hold altid øje med hesten når du behandler de store muskel-grupper.

Hav aldrig WAVE RLT tændt i mere end 60 min uden pause.

LED terapi-lysene har en stor effekt i watt. 100.000 mW i de store og 30.000-50.000 mW i de andre.

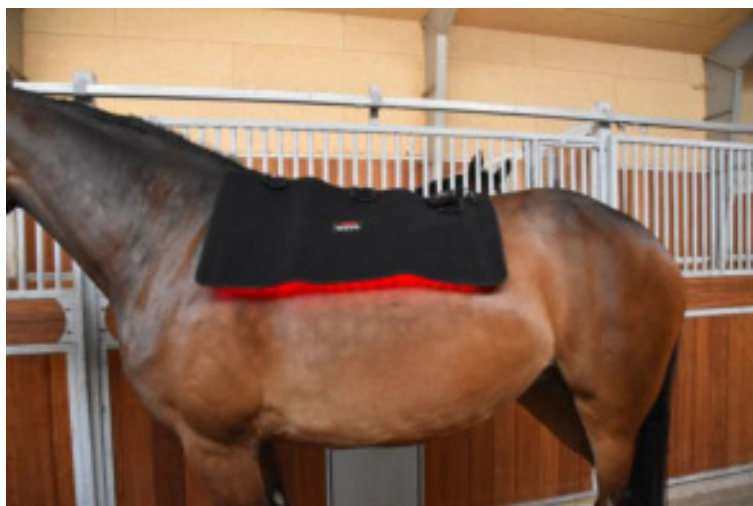

2 stk WAVE RLT Large sat sammen med 3 Small Belts til en kæmpe WAVE RLT til overlinen

Sådan bruger du WAVE RLT PEN

I vores WAVE RLT PEN bruger vi en kombination af 3 forskellige LED'er, som er udvalgt til at give den bedste biologiske effekt overalt på kroppen.

De 3 lysbølger er 660 nm rødt lys, 730 dybrødt lys (meget lidt synlig) & 850 nm nærinfrarødt lys (usynlig for det menneskelige øje)

Bemærk at du kun vil se det som om at 1 lys er tændt - de 2 andre udsender lysbølger som du ikke kan se. Det er helt normalt.

Nogle heste oplever effekten af lysterapi næsten med det samme, andre oplever det over en længere periode på ca 3 uger.

Det afhænger meget af skaden, og alderen på skaden.

Derfor anbefaler vi at man bruger en 3-ugers plan - før man sammenligner effekten.

Hvis du oplever effekten med det samme, så skal du fortsætte med at behandle.

Oplever du ikke at hesten reagerer så er det også normalt. Du skal blot fortsætte med at behandle, men øge behandlinger fra 1 gang om dagen, til 3 gange om dagen, med op til 3 minutters varighed, i 3 uger.

Efter 3 ugers konstant behandling vil de fleste heste mærke en forandring.

Hvis du behandler med et andet produkt, så skal du ikke pludseligt stoppe den behandling, når du begynder på lysterapi, med mindre du føler at behandlingen ikke virker.

Du kan sagtens fortsætte din behandling fra dyrlægen, men hør altid dyrlægen ad, om det har nogen dårlig virkning hvis du behandler med lysterapi.

Dyrlægerne vil sjældent bede dig om IKKE at bruge lysterapi.

Hold WAVE RLT PEN hen over det område du vil behandle. Du kan enten holde den helt ind til huden, eller op til 15 cm fra. Jo længere væk desto svagere behandling.

Brug ikke WAVE RLT PEN i mere end 5 minutter af gangen. Hold en pause mellem hver behandling på ca 1 minut eller til enheden er kølet lidt ned. Så undgår du overophedning af enheden.

| Smerte/skade | Let smerte/skade | Moderat smerte/skade | Stærk smerte/stor skade |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| Dosis | 1 minut pr område 1 gang om dagen | 2 minutter pr område 2-3 gange om dagen | 3 minutter pr område 3 gange om dagen |

WAVE RLT PEN & triggerpoints


Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste.

Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.

Her har du en tegning over de områder du kan påvirke.

Men rådfør dig altid med en dyrlæge hvis du er i tvivl.

Du kan også nemt lægge din WAVE RLT Pad i det område.

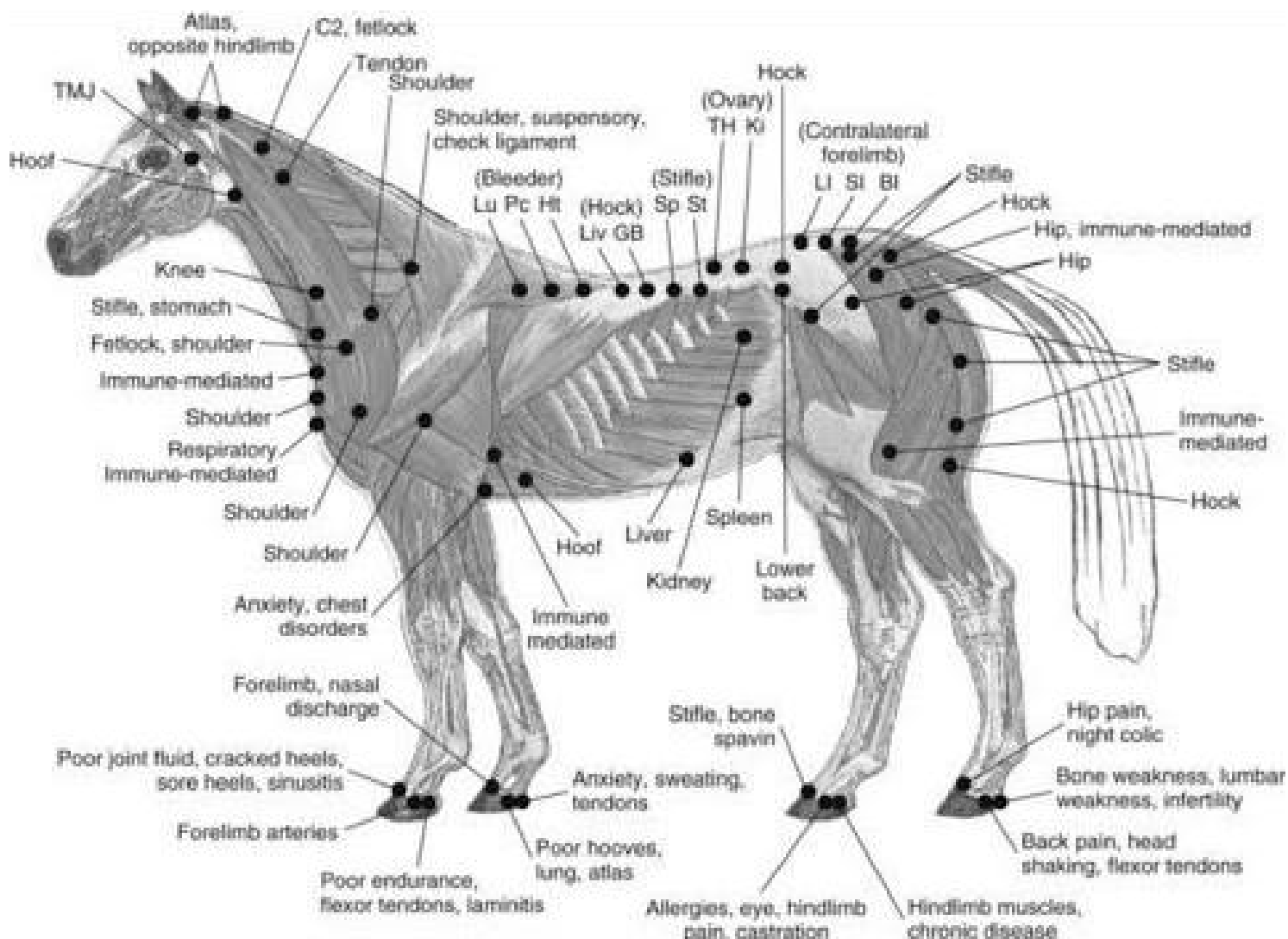

Triggerpoints i hovedet

Du kan med fordel bruge de akupunktur punkter der findes på heste med både
WAVE RLT PEN & WAVE RLT Pads

Du kan også bruge den direkte på sår eller sacoider, muk, svamp eller andre hudlidelser.


Her har du en tegning over de områder du kan påvirke.

Men rådfør dig altid med en dyrlæge/behandler hvis du er i tvivl. De vil helt sikkert gerne vise dig hvor du kan give behandling på DIN hest.

Husk at lysterapi ingen bivirkninger har.

Så det er helt sikkert for dig at bruge.

Lys aldrig ind i hestens øjne!

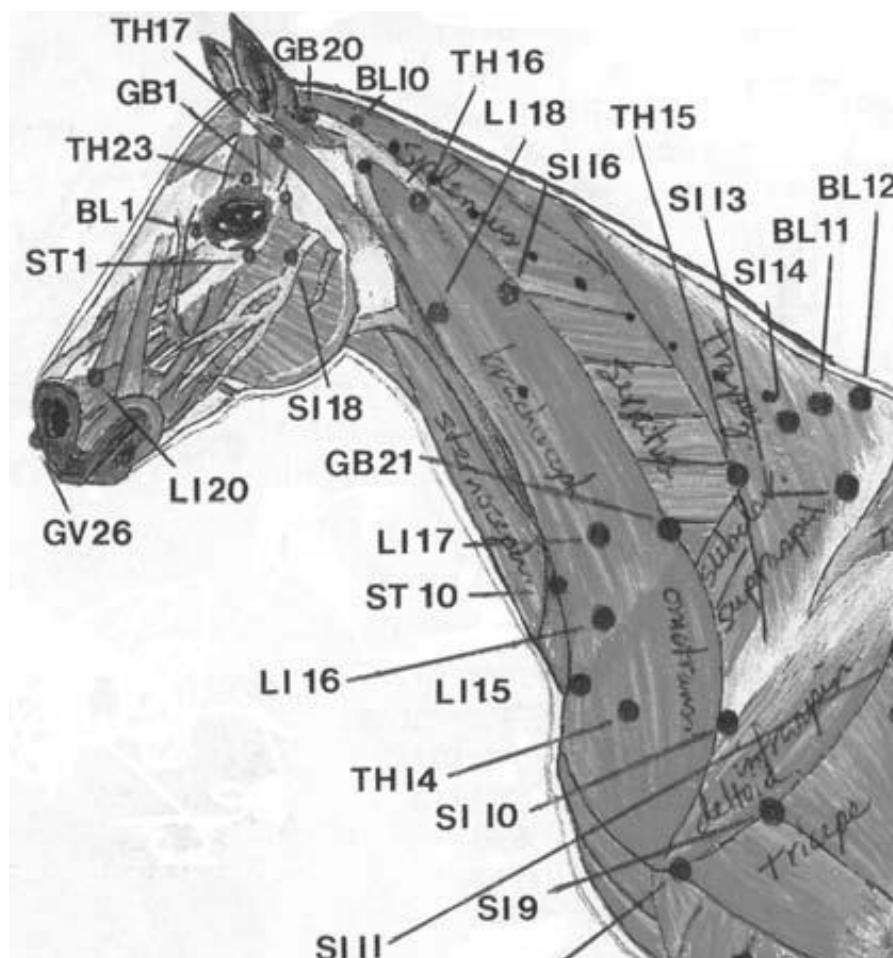

WAVE HALTER


WAVE HALTER er en grime som vi har lavet for at gøre det nemt for dig. Den kan åbnes fra begge sider med karabinhager, og hele underdelen kan fjernes med de 3 karabinhager, så du meget nemt kan påføre WAVE RLT uden at skade den ved at presse den ind under din normale grime.

Der er 3 punkter hvor du kan fjerne velcro så WAVE RLT sidder 100% korrekt på din hests hoved.

Den kommer i str shetland, pony, cob, full, X-Full

Pris 499,-

BEMÆRK - Lys medfølger ikke

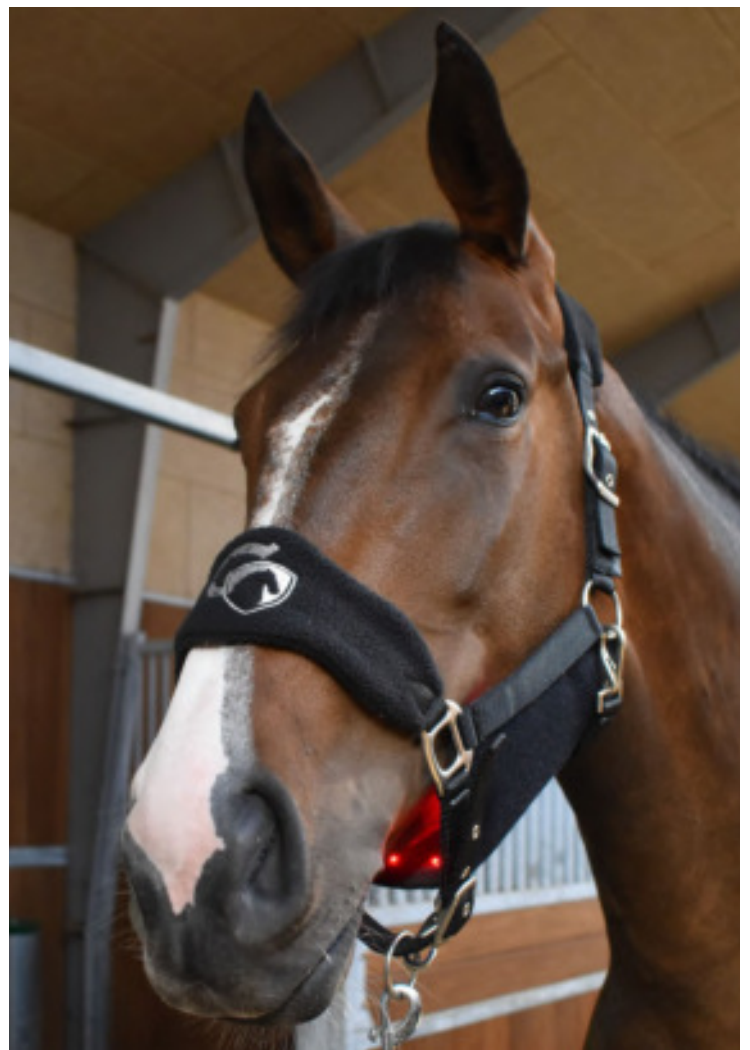

WAVE THERAPY BOOTS

WAVE THERAPY BOOTS er lavet med det formål at kunne beskytte WAVE Pad når den bruges på ben.

Den har også en funktion i sig selv da det inderste indlæg er et FIR indlæg som tilfører vævet infrarød varme som øger blodcirkulationen.

Vi kommer løbende med nye indlæg som kan bruges sammen med WAVE RLT eller bare bruges alene i vores multifunktionelle gamacher.

Du kan bruge både WAVE RLT med eller uden FIR THERAPY PAD.

Kommer i sæt med 2 stk i Pony/Cob eller Full/X-Full

Pris 799,- Dkk



WAVE RLT PEN

WAVE RLT PEN

Smart lille håndholdt lysterapi pen til de steder hvor du har brug for intens behandling og hvor det er svært at komme til.

God til akupunktur punkter, triggerpoints, inde i øre, små sår, sacoider, hove, hovbylder, knæskader, spot-behandling.

Er med 3 bølgelængder

Rødt lys: 660 nm - synlig

Dyb rødt lys: 730 nm - meget svagt synlig

Nær-infarødt lys: 850 nm - ej synlig

Behandlingstid 1-3 minutter

Effekttæthed: 217 mW/cm²

Slukker efter 5 minutters brug

Medfølger sikkerhedsbriller, etui, pudseklud til linsen, oplader, 2 stk genopladelige batterier, samt strop der kan vedhæftes bunden af WAVE RLT PEN

PRIS: 1299,- Dkk



WAVE RLT SMALL

Mål: 23 x 35,5 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 30.000 mW

Effekttæthed(Irridiance) : 77,8mW/cm²

Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys
(kombineret i 40 LED lys)

INCL: 3 stk Wave Belts S + 1 stk Wave Belt XL
Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning

PRIS: 4499,-

Kan sættes i WAVE BOOTS & WAVE HALTER
God til led, hoved, knæ, has og brystben
Kan også bruges på skulder og lænd.



WAVE RLT SMALL & THERAPY BOOTS

Mål: 23 x 35,5 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 30.000 mW

Effekttæthed (irradiance): 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys
(kombineret i 40 LED lys)

INCL:

1 WAVE RLT SMALL

1 stk ALU kuffert

1 sæt WAVE THERAPY BOOTS (i alt 2 stk)

3x Small strop - så den kan sættes fast på ben & hoved

1 x Xlarge strop - så den kan sættes fast på hals

Batteri med velcro, oplader & vejledning

PRIS: 4500,-



2 stk WAVE RLT SMALL & THERAPY BOOTS

Mål: 23 x 35,5 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 30.000 mW pr stk

Effekttæthed (irradiance): 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys
(kombineret i 40 LED lys) pr stk

INCL:

2 WAVE RLT SMALL

1 stk ALU kuffert

1 sæt WAVE THERAPY BOOTS (i alt 2 stk)

3x Small strop - så den kan sættes fast på ben & hoved

1 x Xlarge strop - så den kan sættes fast på hals

Batteri med velcro, oplader & vejledning

PRIS: 7999,-



WAVE RLT SMALL BIG PACK

Alt hvad du behøver for at kunne behandle din hest overalt med lysterapi

Mål: 23 x 35,5 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 30.000 mW

Effekttæthed (irradiance): 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 40 røde LED og 40 Nær-infrarøde LED samlet 80 LED lys
(kombineret i 40 LED lys)

INCL:

1 stk luksus kuffert

1 stk valgfri WAVE grime

2 sæt WAVE THERAPY BOOTS (i alt 4 stk)

1 stk WAVE RLT SMALL

2x Small strop

2x Medium strop

2x Large strop

1 x Xlarge strop


2 x XXL strop

1x 3XL strop

Batteri med velcro, oplader & vejledning

PRIS: 6200,-

Et perfekt sæt til behandling af din hest eller andre dyr

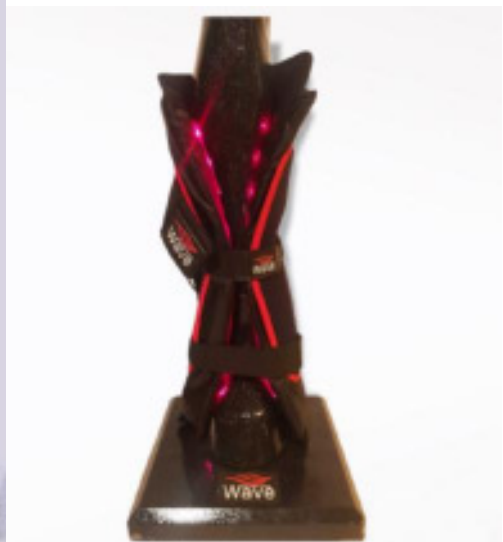

WAVE RLT MEDIUM

Mål: 29 x 53 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 50.000 mW

Effekttæthed: 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys
(kombineret i 60 LED lys)

INCL: 1 stk Wave Belt L - forlænger

1 stk Wave Belt XL - til hals

1 stk Wave Belt XXL - til skulder/hals/bagknæ

1 stk Wave Belt 3XL - til rundt om maven/lænd

Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning

PRIS: 5499,-

Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagknæ & lænd



WAVE RLT MEDIUM & THERAPY BOOTS

Mål: 29 x 53 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 50.000 mW

Effekttæthed: 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys
(kombineret i 60 LED lys)

INCL: 1 stk Wave Belt L

1 stk Wave Belt XL


1 stk Wave Belt XXL

1 stk Wave Belt 3XL

Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning

PRIS: 5798,-

Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagkølle & lænd

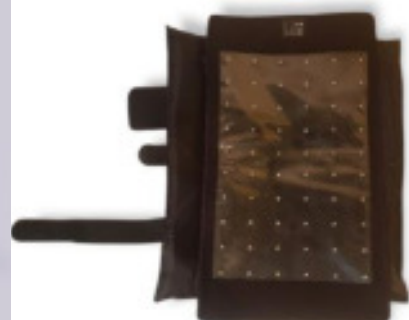

2 stk WAVE RLT MEDIUM & THERAPY BOOTS

Mål: 29 x 53 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 50.000 mW pr stk

Effekttæthed: 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nærinfrarøde LED samlet 120 LED lys
(kombineret i 60 LED lys) pr stk

INCL:

2 stk WAVE RLT Medium

2 opladere

2 stk batterier

1 stk Wave Belt L

1 stk Wave Belt XL


1 stk Wave Belt XXL

1 stk Wave Belt 3XL

Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning

PRIS: 9699,-

Til de større muskelgrupper, nakke, kæbe, hals, bagknæ & lænd

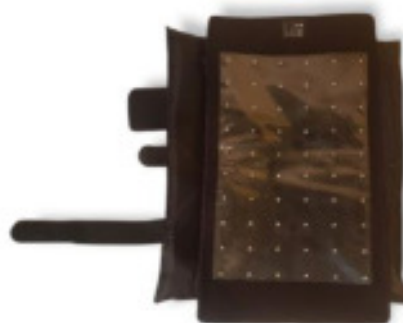

WAVE RLT MEDIUM BIG PACK

Alt hvad du behøver for at kunne behandle din hest overalt med lysterapi

Mål: 23 x 53 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 50.000 mW

Effekttæthed (irradiance): 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 60 røde LED og 60 Nær-infrarøde LED samlet 120 LED lys
(kombineret i 60 LED lys)

INCL:

1 stk luksus kuffert

1 stk valgfri WAVE grime

2 sæt WAVE THERAPY BOOTS (i alt 4 stk)

1 stk WAVE RLT MEDIUM

2x Small strop

2x Medium strop

2x Large strop

1 x Xlarge strop


2 x XXL strop

1x 3XL strop

Batteri med velcro, oplader & vejledning

PRIS: 7500,- samlet tilbud

Et perfekt sæt til behandling af din hest eller andre dyr

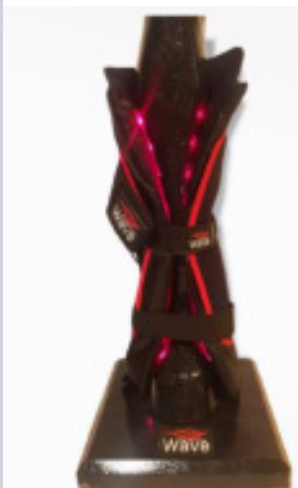

WAVE RLT LARGE

Mål: 44 x 85 cm

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 100.000 mW

Effekttæthed (irradiance): 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 180 røde LED og 180 Nærinfrarøde LED samlet 360 LED lys
(kombineret i 180 LED lys)

INCL: 2 stk Wave Belts XL

1 stk Wave Belt XXL

1 stk Wave Belt 3XL

Batteri med velcro, oplader, opbevarings kuffert & vejledning

PRIS: 9999,-

Til de større muskelgrupper & lænd



WAVE RLT XLARGE OVERLINIE

Mål: 44 x 85 cm x 2 (dækker over 88 x 95 cm når de er sat sammen)

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 200.000 mW (100.000 mW pr stk)

Effekttæthed: 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 360 røde LED og 360 Nær-infrarøde LED samlet 720 LED lys
(kombineret i 360 LED lys)

Kan bruges sat sammen eller hver for sig.

INCL: 3 stk Wave Belts S til at sætte Wave Pads sammen med

2 stk Wave Belts XL



2 stk Wave Belt XXL

2 stk Wave Belt 3XL

2 stk Batterier med velcro, 2 stk oplader, stor opbevarings kuffert &
Vejledning

PRIS: 17.999,- DKK

Til de større muskelgrupper, lænd & specielt til overlinien

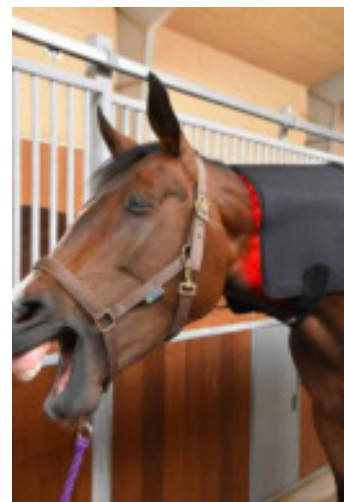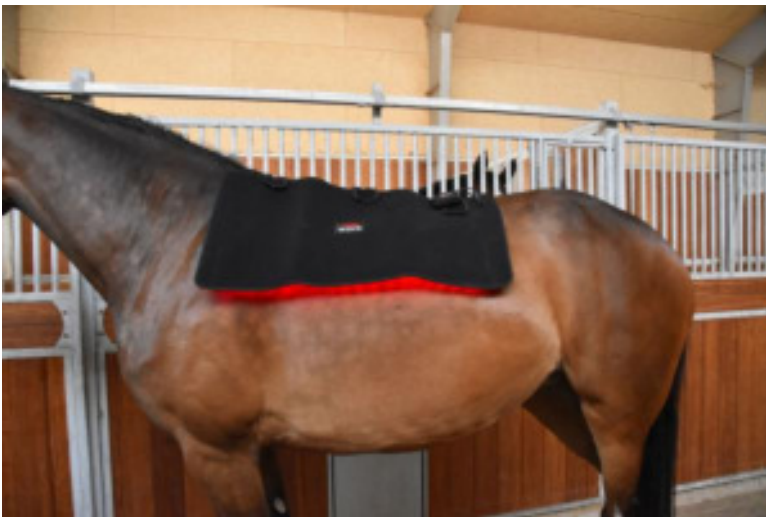

WAVE RLT XX-LARGE HALS & OVERLINIE

Mål:

Bølgelængder: 660 nm & 850 nm

Effekt: 200.000 mW (100.000 mW pr stk)

Effekttæthed: 77,8 mW/cm²

Antal dioder: 400 røde LED og 400 Nær-infrarøde LED samlet 800 LED lys
(kombineret i 400 LED lys)

INCL: 2 stk Medium stropper

2 stk Large stropper



1 stk XL strop

1 stk 3XL strop

2 stk Batterier med velcro, 2 stk oplader, stor opbevarings kuffert &
Vejledning

PRIS: 24.999,- DKK

Til de større muskelgrupper, lænd & specielt til overlinien - hele overlinien klaret på
2 behandlinger!

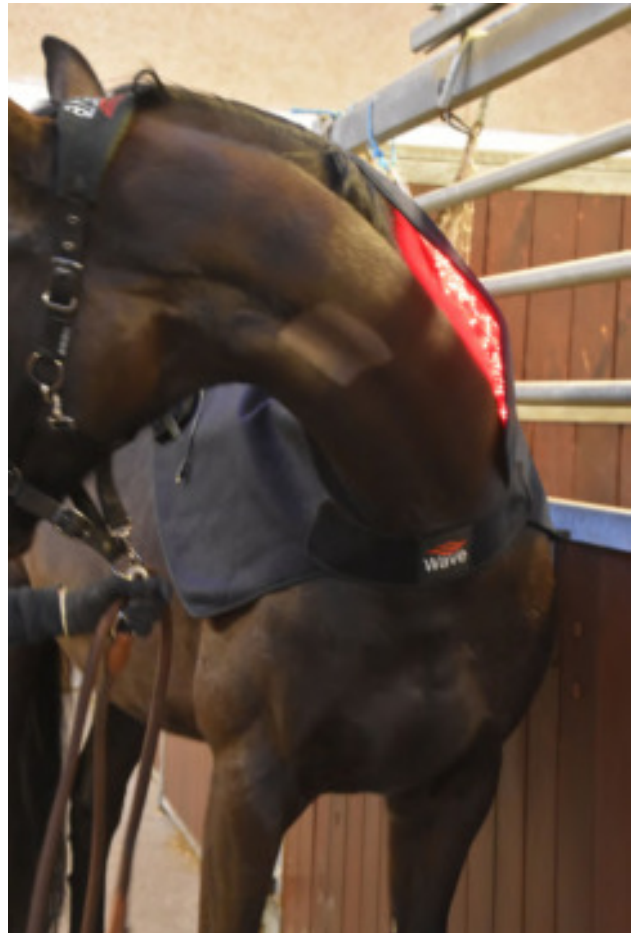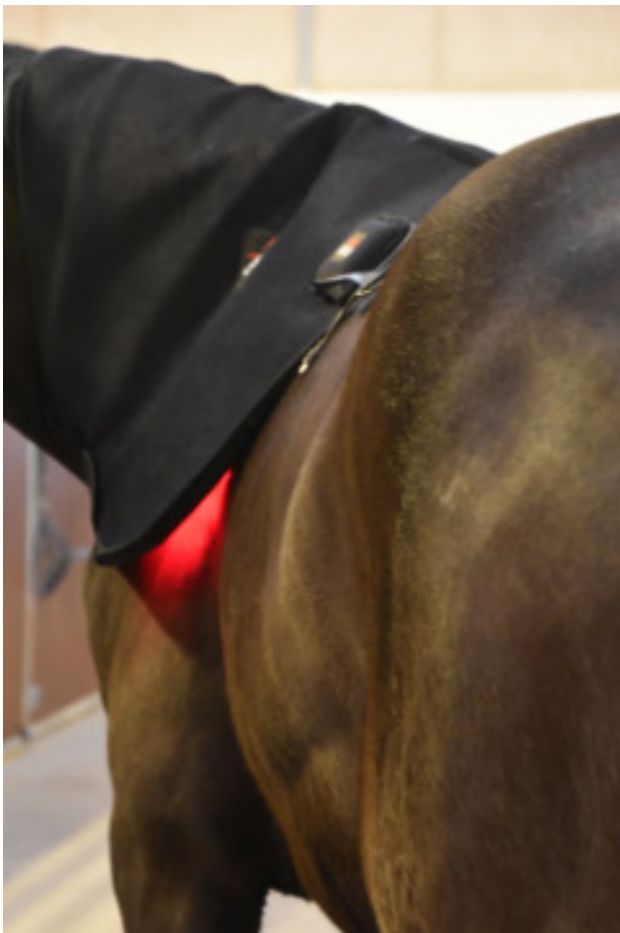

WAVE RLT BELL BOOTS

- 1 stk cm med velcro overside og neopren bagside med plastik vindue
- 1 S strop, 1 M strop, 1 L strop
- Genopladeligt Lithium-ion batteri 11.1V/2200mAh med velcro
- Oplader DC 12.6 V – Charging current: 0.2-1C
- Flot rejsekuffert med lynlås i stødfast EVA materiale
- Manual med instruktioner i brug samt billeder og vejledning i brugen af alle vores produkter


Kan bruges som klokke, til forknæ, has, kode, pande oma.

Pga udformningen kan den let sættes rundt om det sted du vil behandle.

Eller sættes sammen med andre af vores produkter, til et nyt produkt.

Eksempelvis på punkter i hovedet hvor pandebåndet sidder, sammen med en small eller medium pad, skaber du en slags "hætte"

Pris 2399,-

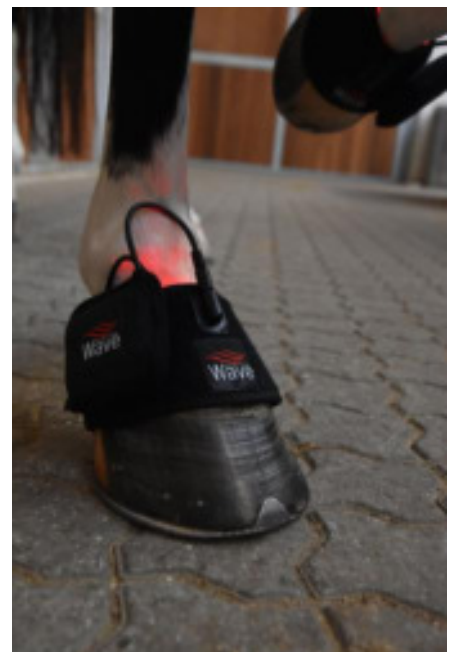

WAVE RLT BELL BOOTS

- 2 stk cm med velcro overside og neopren bagside med plastik vindue
- 2 S strop, 2 M strop, 2 L strop
- 2 stk Genopladeligt Lithium-ion batteri 11.1V/2200mAh med velcro
- 2 stk oplader DC 12.6 V – Charging current: 0.2-1C
- Flot rejsekuffert i aluminium
- Manual med instruktioner i brug samt billeder og vejledning i brugen af alle vores produkter

Kan bruges som klokke, til forknæ, has, kode, pande oma.

Pga udformningen kan den let sættes rundt om det sted du vil behandle.







Eller sættes sammen med andre af vores produkter, til et nyt produkt.

Eksempelvis på punkter i hovedet hvor pandebåndet sidder, sammen med en small eller medium pad, skaber du en slags "hætte"

Pris 4500,-



Kundebilleder

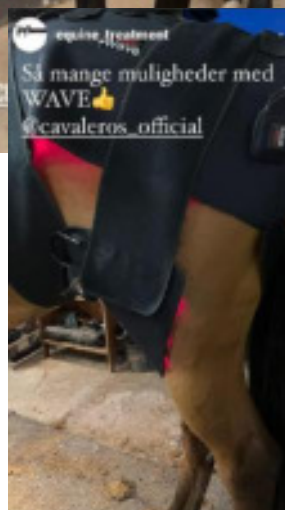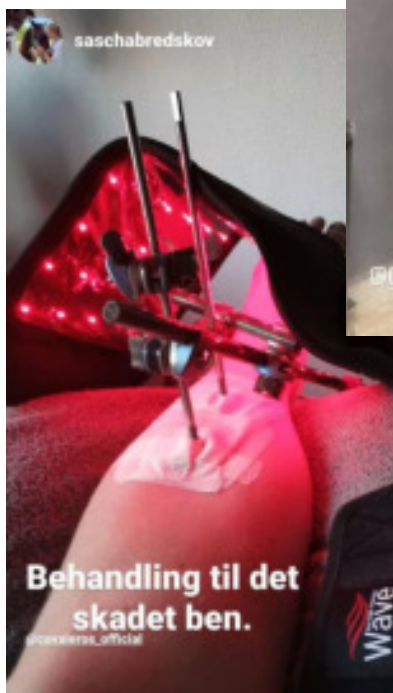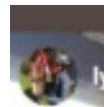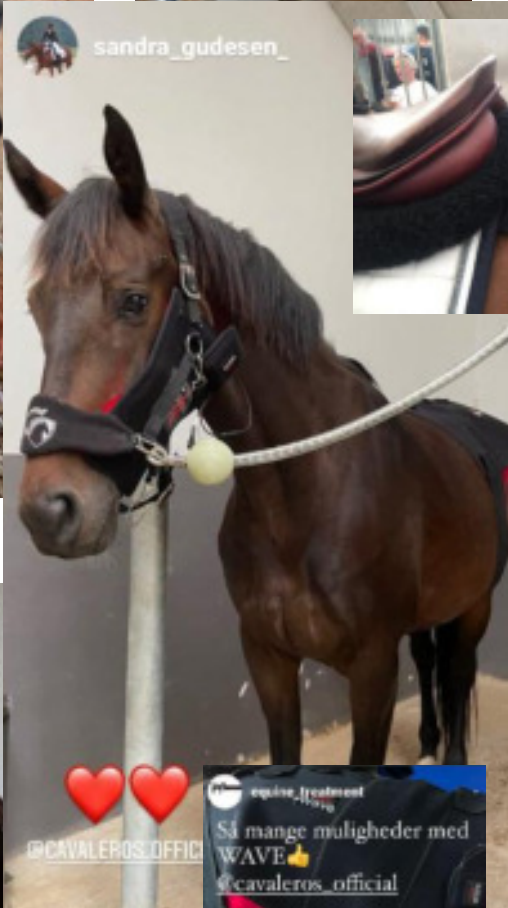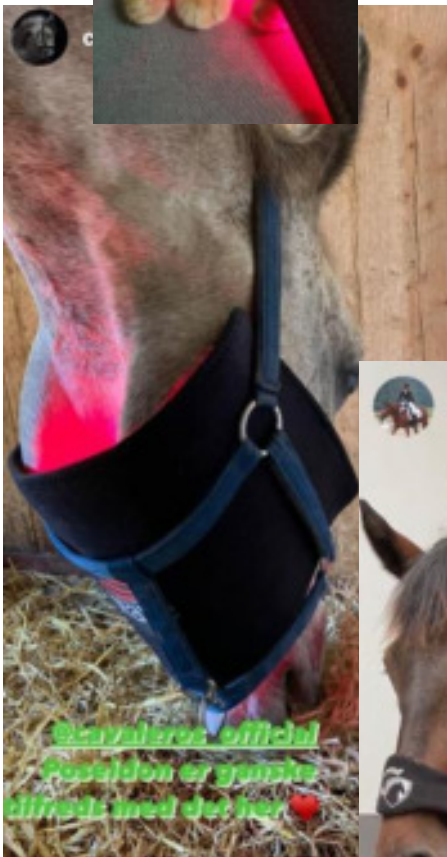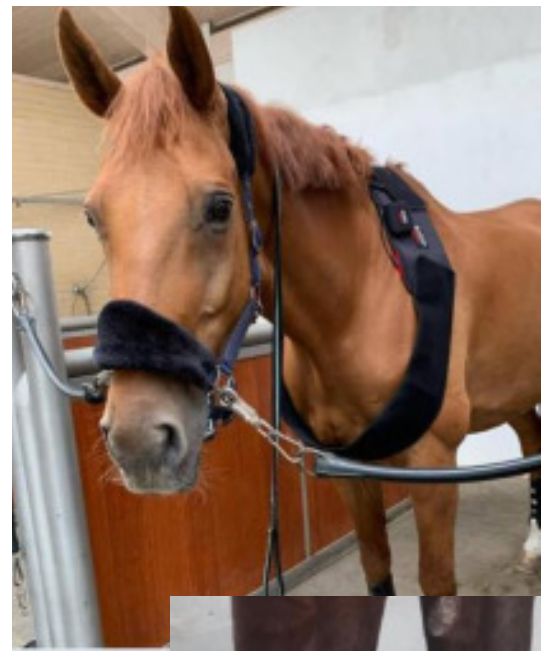



Ringsjöbing



Red Light Therapy
Wave

En del af Cavaleros

www.cavaleros.dk

Middelfartvej 6E, Dk-4200 Slagelse - Tlf.: +45 6073 7722